

# ACTIMAR®

---

## FIALOIDI

### 15 | FIALOIDI RICHIUDIBILI

Soluzione salina ipertonica per uso inalatorio a base di: Acido ialuronico ad alto peso molecolare, Sodio Cloruro 3%, Sodio bicarbonato. In fialoidi sterili pronti all'uso.

#### INDICAZIONI

**Actimar® Fialoidi** è un dispositivo medico di classe IIA consigliato per l'igiene delle fosse nasali del bambino e in caso di terapia inalatoria a carico delle alte e basse vie respiratorie. Utile in caso di raffreddori, riniti di tipo allergico e non, rinosinusi, nonché in tutti quei casi in cui è richiesta una decongestione nasale oppure in presenza di una compromessa clearance mucociliare, nonché in periodi di affezione acuta alle basse vie respiratorie.

Fluidifica e migliora il drenaggio delle mucosità nasali; decongestiona le fosse nasali dal muco ristagnante nei casi di raffreddore e rinite allergica; lenisce la sintomatologia nei pazienti affetti da sinusite e rinosinusi; deterge a fondo le cavità nasali allontanando polveri e smog. **Actimar® Fialoidi** può essere utilizzato come coadiuvante nella prevenzione e nella terapia delle otiti medie in cui si ravvisi l'utilità di una miglior ventilazione delle vie aeree superiori. Inoltre, **Actimar® Fialoidi** può essere utilizzato anche in caso di terapia inalatoria a carico delle alte e basse vie aeree, per favorire l'espettorazione, mantenendo una fisiologica idratazione. Non contiene conservanti. **Actimar® Fialoidi** si presta alle esigenze di tutta la famiglia: studiato per il bambino, può essere utilizzato anche per l'adulto con medesime indicazioni.

#### COMPOSIZIONE

Acqua, Sodio Cloruro, Acido ialuronico Sale Sodico, Sodio Bicarbonato, Sodio Fosfato.

#### MODO D'USO

##### LAVAGGIO NASALE

- 1) Spezzare con movimento rotatorio il tappo del fialoide.
- 2) Tenere la testa inclinata da un lato, mai all'indietro.
- 3) Accostare delicatamente il beccuccio del flaconcino alla narice superiore e premere leggermente per irrorare.
- 4) Tenere la testa inclinata dall'altro lato (mai all'indietro) e ripetere l'irrorazione nell'altra narice.
- 5) Il contenitore può essere richiuso capovolgendo e premendo il tappo sulla bocca della fiala.

##### POSOLOGIA

Irrorare con mezza fiala per narice 2 - 3 volte al giorno o più spesso al bisogno o secondo parere medico.

##### TERAPIA INALATORIA

**Actimar® Fialoidi** può essere utilizzato anche in caso di terapia inalatoria: in questo caso utilizzare gli appositi dispositivi inalatori che ne garantiscano la corretta nebulizzazione e seguire le indicazioni dell'apparecchio scelto.

##### POSOLOGIA

Una fiala, 1 - 2 volte al giorno o secondo parere medico.

## CONSERVAZIONE

In caso di utilizzo di metà dose, la fiala va immediatamente richiusa con il proprio tappino e va conservata ad una temperatura compresa tra 2°C e 8°C (in frigorifero) ed utilizzata entro 12 ore dall'apertura. Le fiale devono essere conservate nel proprio astuccio, a temperatura ambiente, al riparo dalla luce e dal calore. Non congelare.

## AVVERTENZE

Conservare le istruzioni interne insieme al prodotto. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini al fine di evitare uno scorretto uso del prodotto. Evitare il contatto con gli occhi. Non destinato ad uso orale. Non iniettabile. L'utilizzo di più soggetti di una stessa fiala può pregiudicare l'efficacia e può essere causa dell'aggravarsi dei problemi esistenti nonché causare il manifestarsi di problematiche prima non presenti. Non utilizzare in caso di ipersensibilità individuale verso uno dei componenti del prodotto. Non utilizzare in casi di epistassi in corso o appena conclusa, né in caso di mucosa nasale non integra. L'inalazione di soluzioni saline in pazienti particolarmente sensibili potrebbe provocare episodi di broncospasmo: in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico al fine di istituire idonea terapia. Non utilizzare oltre la data di scadenza o qualora la confezione risulti aperta o danneggiata. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. In caso di reazioni avverse sospendere l'utilizzo del prodotto e contattare il medico. Non utilizzare in caso di contaminazione accidentale dopo apertura. Il fumo potrebbe compromettere l'effetto protettivo dell'acido ialuronico. L'uso del presente dispositivo medico non sostituisce altri trattamenti prescritti dal proprio Medico. Actimar® Fialoidi può interferire chimicamente con diverse sostanze se queste sono mescolate con la stessa nella soluzione di inalazione. Non utilizzare Actimar® Fialoidi in contemporanea con altre sostanze a meno che ciò non sia espressamente prescritto dal proprio medico. In tal caso, seguire scrupolosamente le indicazioni prescritte dal proprio medico e le istruzioni d'uso del prodotto utilizzato in associazione con Actimar® Fialoidi. In caso di eventuali modifiche nell'aspetto della miscela prodotta sospendere immediatamente la terapia e contattare il proprio medico. Non utilizzare il prodotto in associazione con composti ammoniacali quaternari. La non corretta osservanza delle avvertenze e modalità d'uso potrebbe pregiudicare l'efficacia del prodotto o essere causa dell'aggravarsi dei problemi esistenti nonché causare il manifestarsi di problematiche prima non presenti. Flaconcini richiudibili, utilizzare il contenuto entro 12 ore dall'apertura. Dopo l'apertura conservare in frigorifero. **Non utilizzare il prodotto per un periodo superiore ai 30 giorni continuativi.** Conservare nella confezione originale.

## EFFETTI COLLATERALI

In taluni casi l'utilizzo del prodotto può provocare un lieve e transitorio senso di irritazione locale. Ipersensibilità verso i componenti. L'uso prolungato può dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione: dove ciò si verifici interrompere il trattamento e consultare il medico al fine di istituire idonea terapia. Qualora si riscontrassero effetti indesiderati, descritti e non nel foglio illustrativo, informare il proprio medico o il farmacista.

## PRESENTAZIONE

15 fialoidi richiudibili da 5 ml.

Il Dispositivo Medico non deve essere gettato nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i Dispositivi Medici che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.



 Gruppo Farmaimpresa srl - Via Cipro, 1 - 25124 Brescia Italy  
Distribuito da: **Uriach Italy S.r.l.** A SOCIO UNICO  
Assago Milanofiori, Str.l. Pal.F6 - 20057 Assago (MI)



Per i nostri prodotti scegliamo packaging certificato FSC®. Il marchio FSC garantisce che la carta utilizzata proviene da una gestione forestale rispettosa dell'ambiente, socialmente utile ed economicamente sostenibile.

