

COLPOFIX® OVULI

10 | OVULI VAGINALI

INDICAZIONI

Prevenzione e trattamento della secchezza vaginale a carattere aspecifico e in caso di vaginiti atrofiche. Coadiuvante in caso di irritazioni, bruciori e pruriti vaginali nonché nelle affezioni vaginali a carattere flogistico ed infettivo.

Colpofix® Ovuli è indicato nelle donne in età fertile, in menopausa e nelle peri-menopausa.

INFORMAZIONI

Colpofix® Ovuli è un dispositivo medico che aiuta a mantenere inalterate le difese naturali della vagina ed agevola il ripristino della flora vaginale; la specifica formula a base di acido ialuronico ed acido lattico aiuta ad eliminare i sintomi conseguenti a squilibrio della idratazione e/o del pH vaginale. L'acido ialuronico svolge un'azione idratante e lubrificante contro la secchezza vaginale facilitando il ripristino dell'ambiente vaginale. L'acido lattico, componente normalmente presente in vagina, favorisce un'immediata correzione del pH e facilita il naturale ripristino del delicato ecosistema vulvo-vaginale. Il policarbophil, una volta legato al muco vaginale, è in grado di rilasciare in modo costante H+ che contribuiscono ad abbassare il pH dell'ambiente vaginale.

INGREDIENTI

Acido ialuronico sale sodico, policarbophil, acido lattico, vitamina E, vitamina A, acido 18-beta glicirretico, tea tree oil, fosfatidilcolina, trigliceridi semisintetici.

POSOLOGIA

Introdurre in vagina 1 ovulo al giorno, preferibilmente di sera prima di coricarsi, per 5-7 giorni successivi alla fine del ciclo mestruale o secondo indicazione medica, per un massimo di 30 giorni consecutivi. Il prodotto è compatibile con i profilattici.

MODALITÀ D'USO

- 1) Lavare le parti intime accuratamente (preferibilmente sia con una lavanda vaginale esterna che con una interna);
- 2) Aprire la confezione e, dopo essersi ben lavate le mani, prelevare dal blister un singolo ovulo;
- 3) Inserire l'ovulo delicatamente in vagina cercando di arrivare in profondità, preferibilmente in posizione supina, evitando fuoriuscite accidentali.

CONSERVAZIONE

Conservare la confezione ben chiusa in luogo asciutto, tra i 5 ed i 25°C, a riparo dalla luce e da fonti di calore.

Dispositivo medico

CE 0425

COLPOVNI23FI

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. Non utilizzare in caso di ipersensibilità accertata verso uno o più componenti. Non utilizzare il prodotto in caso di lesioni o ferite vaginali. Non utilizzare in presenza di mestruazioni. Non superare la dose consigliata senza il parere del medico. L'uso, specie se prolungato, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. Ove ciò si verifici, interrompere il trattamento e consultare il medico al fine di istituire un'idonea terapia. È importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto illustrativo.

PRECAUZIONI D'USO

Nelle donne in gravidanza ed in allattamento l'uso degli ovuli deve essere limitato ai casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. In caso di imene intatto, prima dell'utilizzo, consultare il proprio ginecologo sulle specifiche modalità d'uso. Dispositivo monouso: non riutilizzare in caso di fuoriuscite accidentali. Rischio di infezione in caso di riutilizzo.

SCADENZA

La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Vedere la scadenza riportata sulla confezione. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata.

Formato:

Confezione da 2 blister contenente 10 ovuli vaginali da 2gr/ovulo.

Confezione da 1 blister contenente 2 ovuli vaginali da 2gr/ovulo.

Data di ultima revisione: Novembre 2023

RICICLAMI!

Per un ambiente più pulito, fai la raccolta differenziata!
Per il corretto smaltimento degli imballaggi
consulta la tabella e segui le indicazioni del tuo Comune.
Per maggiori informazioni: laborest.com/it/ambiente

COSA	DOVE	COD.
ASTUCCIO	CARTA	PAP21
FOGLIETTO	CARTA	PAP22
BLISTER	PLASTICA	O7

Legenda dei Simboli



Marcatura CE



Conservare tra 5-25°C



Numero del Lotto



Non disperdere
nell'ambiente dopo l'uso



Data di scadenza



Fabbricante



Non riutilizzare



Consulta il
foglio illustrativo



ADL Farmaceutici s.r.l.
Piazza Grandi, 11
20129 Milano

Distribuito da: **Uriach Italy S.r.l.** A SOCIO UNICO
Assago Milanofiori, Str.1, Pal. F6 - 20057 Assago (MI)
laborest.com

Dispositivo medico

CE 0425

Uriach

L'impegno
di Uriach
per l'ambiente

LABOREST®